

Chaque élément doit être nettoyé avant la 1ère utilisation et après toute utilisation.

Le nettoyage se fait systématiquement en 2 étapes

Étape 1 : laver les éléments avec du savon liquide (type savon noir ou de Marseille) ou du liquide vaisselle. Bien les rincer

Étape 2 : mettre à immerger le serre-tête et l'écran facial dans 1 détergent désinfectant virucide pendant 15 minutes minimum ou les nettoyer avec une lingette aux caractéristiques équivalentes. Rincer à l'eau de réseau et laisser sécher dans une zone propre.

attention

Le désinfectant virucide est aux normes 14476.

Pour les autres, préparer une eau de javel à dilution 0,5%.

Le ratio pour 1L de liquide est : 200ml de javel à 2,6% + 800ml d'eau = javel à 95%.

La préparation doit être conservée dans un contenant adapté et sécurisé hors de portée des enfants.

